



Oxyline Sp. z o.o.
95-200 Pabianice,
ul. Piłsudskiego 23
tel.: 42 2151068, 42 2032035; fax:
42 2032031
www.oxyline.eu email:
oxyline@oxyline.eu

KARTA KATALOGOWA i INSTRUKCJA

Osłona twarzy HLP duża
OS-HLP-L

Jednorazowe osłony twarzy / zachlapania dwuczęściowa wersja długa

Opis produktu:

- lekka i komfortowa w noszeniu osłona twarzy z PET
- regulowany opaska w zakresie obwodu głowy 52-60cm
- prosty i łatwy montaż opisany w instrukcji

Opis wyrobu

- osłona transparent wykonana z folii PET wysokość 418 mm szerokość 308,7mm
- taśma nagłowia długość 665,9mm szerokość 99,2 mm grubość 0.35mm

Produkt nie jest wyrobem sterylnym

Wskazania i ostrzeżenia:

Osłonę należy zachować w czystości. Możliwe jest jej przemywanie miękkim czyszcivem z roztworem alkoholu o stężeniu 60-70%. Nie jest wskazane używanie osłony w pracy ciągłej, ze względu na możliwy negatywny wpływ na wzrok. Osłona nie posiada funkcji ochronny w zakresie rozpraszania światła. Producent nie bierze odpowiedzialności za skuteczne zabezpieczenie użytkownika przed infekcją (w tym m.in. wirusową, bakteryjną, grzybiczą). Produkt uznaje się za jednorazowy, przy czym częste mycie środkami może spowodować zarysowania lub zmatowienie powierzchni. W przypadku długotrwałego użytkowania należy przewidzieć odpoczynek dla oczu.

Uwaga:

Produkt należy zaprzestać używać w przypadku wystąpienia reakcji alergicznej na materiały z jakiego jest wykonany. Produkt należy zaprzestać używać w przypadku otarć wywołanych taśmą nagłowia. Produkt należy zaprzestać używać w przypadku problemów ze wzrokiem, zawrotów głowy. Produkt nie posiada funkcji ochronny w zakresie: rozproszenie światła, korekcji widzenia, promieniowania, nie posiada właściwości mechanicznych chroniących przed cząstkami o dużej prędkości lub cząstkami o dużych temperaturach. Produkt nie chroni przed łukiem elektrycznym.

Utylizacja:

Przed wyrzucenie do kosza z odpadami plastikowymi należy przemyć przy użyciu alkoholu o stężeniu 60-70% z użyciem miękkie czyszciva.







Dystrybutor w POLSCE: Oxyline Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 23, 95-200 Pabianice, Poland

Producent: HLP Clear Packaging Products (Netherlands) Address: Mercurion 28, NL-6903 PZ ZEVENAAR, Netherland

Kraj pochodzenia: China

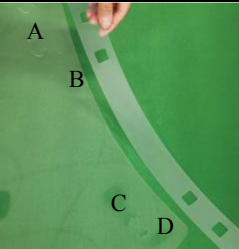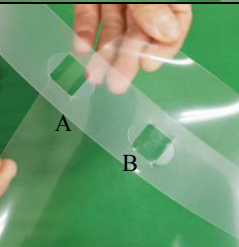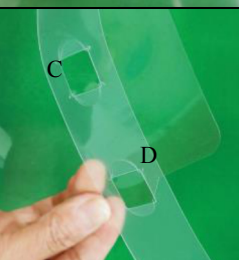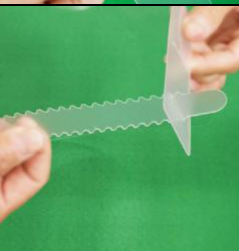

Instrukcja montażu

1		Dopasuj pasek nagłowia do osłony twarzy
2		Przełóż i zablokuj wąsami po lewej stronie zaczepy w otworach
3		Zrób to samo z prawej strony
4		Połącz pasek taśmy nagłowia wprowadzając w pierwszy otwór na końcach „grzebień” dopasowujący
5		Wprowadź w drugi otwór grzebień w ustalonym do głowy użytkownika obwodzie.
6		Montaż zakończony. Dopasuj w razie potrzeby koniec regulowany.

Budowa:

