



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
ODZIEŻ OCHRONNA KATEGORIA I
MODEL: ONBW50/ONBWUR50



ONBW50 - osłony ochronne na buty wysokie jednokrotnego użytku.

ONBWUR50 - osłony ochronne na buty wysokie z podeszwą antypoślizgową, jednorazowego użytku.

UŻYTKOWANIE: Czas użytkowania nakładek zależy bezpośrednio od sposobu użycia i zachowanej ostrożności, należy mieć na uwadze to, że są to nakładki jednokrotnego użytku lub krótkotrwałego użytku. Gwarantują odpowiedni poziom ochrony użytkownikowi w części, którą zakrywają. Nakładki przeciwko zagrożeniom spowodowanym przez pyły nietoksyczne, tłuszcze stałe nietoksyczne i inne podobne odpady nietoksyczne oraz przed lekkimi zagrożeniami mechanicznymi takimi jak otarcia, zadrapania etc. i natryskami cieczy nietoksycznych pod niskim ciśnieniem. Nie należy stosować tego ŚOI w przypadku zagrożeń innego typu.

OPIS:

ONBW50 - wykonane z materiału barierowego - włóknina laminowana folią mikroporową MPFL 65g/m², warstwa zewnętrzna: folia polietylenowa, warstwa wewnętrzna: włóknina polipropylenowa. Kolor biały.

ONBWUR50 - wykonana z materiału barierowego - włóknina laminowana folią mikroporową MPFL 65g/m², warstwa zewnętrzna: folia polietylenowa, warstwa wewnętrzna: włóknina polipropylenowa, Podeszwa 530g/m²; skład: 2%(100% PU), 79% PCW, 19% PES. Kolor biały.

SPOSÓB ZAKŁADANIA I UŻYTKOWANIA:

- Sprawdź wizualnie czy nakładki są w nienaruszonym stanie (brak przekłuć, rozejścia się szwów etc.)
- Wyjmij nakładki z opakowania rozłóż i załóż na każdą nogę, po założeniu każdej zawiąż paski powyżej łydki z wycuciem wokół nogi tak by uniemożliwić się ich zsuniecie .

TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE I UTYLIZACJA:

Produkt musi być transportowany i przechowywany w oryginalnym opakowaniu, w suchych pomieszczeniach z daleka od źródeł światła i ciepła. Jeżeli nakładki nie zostały skażone mogą być wyrzucane razem ze stałymi odpadami komunalnymi. Jeżeli zostały skażone muszą być utylizowane zgodnie z obowiązującym prawem i regulacjami dotyczącymi ŚOI.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE:

Nie prać	Nie chlorować	Nie suszyć mechanicznie	Nie prasować	Nie czyścić na sucho	Łatwopalne

Produkt ten jest środkiem ochrony indywidualnej (ŚOI) – kategorii I
Został zaprojektowany i wprowadzony do obrotu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 Producent: Oxyline Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 23, 95-200 Pabianice, email: oxyline@oxyline.eu